

MANUAL DO USUÁRIO

MOTOR S3

MOTOR DE BANCADA



ODONTOMEGA



MOTOR S3

8.8

X1000RPM



ON



FWD



HAND



REV

FOOT





ÍNDICE

ORIENTAÇÕES E GARANTIA	4
RECOMENDAÇÕES E CUIDADOS	5
PROBLEMAS E SOLUÇÕES	7
CUIDADOS DE SEGURANÇA.....	8
GUIA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA	9

Leia as instruções antes de utilizar o equipamento.
Obrigado por comprar nossos produtos.



1. Orientações gerais

Este é o manual de usuário do motor de bancada S3 da linha S de motores Odontomega. O design e especificações deste produto podem sofrer alterações de projeto objetificando sempre oferecer o melhor equipamento da categoria para nossos clientes.

Parabéns por adquirir um motor Odontomega! Pedimos que se atenha aos cuidados gerais e manutenção periódica de seu equipamento visando estender ao máximo a longevidade de seu equipamento. Guarde esse manual para consultas futuras ou faça o download da versão mais recente em nosso site www.odontomega.com.br

Ao buscar atendimento no setor de assistência técnica Odontomega sempre informe o modelo correto e o número de série para facilitar e agilizar o seu atendimento pelos nossos profissionais.

Todos os motores Odontomega são testados individualmente antes de serem enviados, caso o seu motor não esteja funcionando corretamente entre em contato com a revenda imediatamente após o recebimento.

2. Garantia

- *CAIXA CONTROLADORA* : **1 ano à partir da data da compra;**
- *PEDAL* : **1 ano à partir da data da compra;**
- *PEÇA DE MÃO (CANETA)* : **3 meses à partir da data da compra.**

A garantia **NÃO** cobrirá danos causados por **USO INADEQUADO** do aparelho, nem o desgaste natural das peças: pinça, rolamentos, cabo, bem como marcas, arranhões, manchas ou trincas oriundas de desgaste de uso, quedas ou acidentes com o equipamento.

3. Taxa de serviço

Será aplicada a taxa de serviço em casos de falha ou mau funcionamento devido ao uso inadequado ou indevido por parte do usuário, tais como:

- Ligar o aparelho em voltagem errada;
- Quedas, tombos e acidentes com o aparelho;
- Utilizar peças ou acessórios não recomendados pelo fabricante;
- Mau funcionamento devido ao reparo em locais não indicados pelo fabricante;
- Uso indevido ou inadequado.

4. Recomendações de Operação

Siga as recomendações abaixo durante a operação de seu equipamento:

1. Certifique-se que o motor esteja desligado antes de plugar na tomada;
2. Coloque a velocidade de rotação do motor em 0 antes de ligar;
3. Conecte a peça de mão na parte **FRONTAL** da caixa controladora;
4. Conecte o pedal na parte **TRASEIRA** da caixa controladora;
5. Verifique se o mandril da peça de mão está travado;
6. Segure a peça de mão com uma das mãos e ligue o motor com a outra;
7. Verifique a velocidade de rotação da peça de mão;
8. Desligue o motor e conecte o pedal para confirmar se o pedal está funcionando corretamente;
9. Desligue o motor para alterar a direção de rotação através do botão “Esquerda / Direita”.

5. Cuidados e condições operacionais

1. EVITE UTILIZAR O EQUIPAMENTO EM LOCAIS HUMIDOS E SEM VENTILAÇÃO


Busque sempre um local bem ventilado e seco afim de evitar curto circuito e superaquecimento dos componentes eletrônicos.

2. CONDIÇÕES OPERACIONAIS RECOMENDADAS

CONDIÇÕES OPERACIONAIS	Temperatura (°C)	10 - 40 °C
	Umidade relativa (%)	30 - 75 %
	Pressão atmosférica (hPa)	700 - 1.060 hPa

3. CONDIÇÕES OPERACIONAIS RECOMENDADAS

- Dimensões: 2,35mm x 3mm (ISO 7785-2 TIPO 2);
- Encaixe mínimo: 10mm;
- Cumprimento máximo: 35mm quando o mandril está próximo;
- Evitar brocas enferrujadas ou dobradas, isso pode causar desgaste excessivo nos rolamentos;
- Siga as recomendações do fabricante em relação a velocidade máxima das brocas utilizadas.

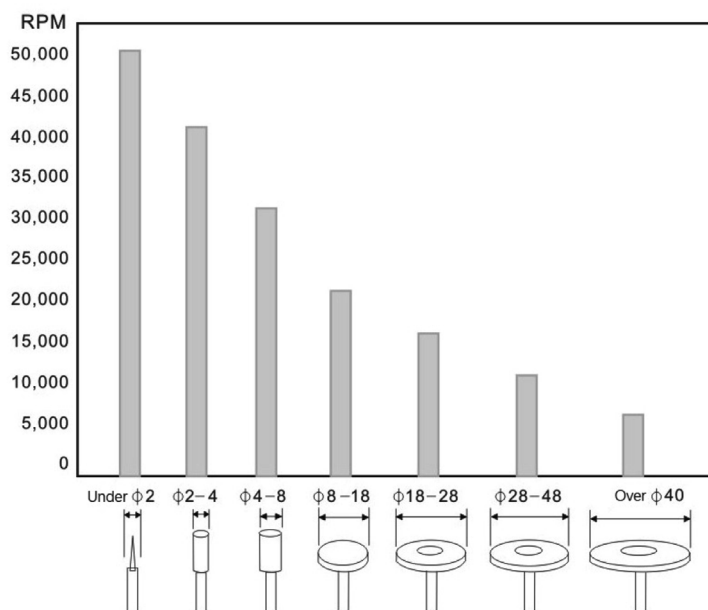

4. Antes de trabalhar com altas velocidades, verifique em baixa velocidade, se existe algum problema, como a vibração da broca.

5. Não realize alterações de velocidade de forma brusca.

6. Utilize fusível 220v / 230v / 240v / 2A para a caixa controladora.

7. Evite quedas e pancadas na peça de mão (caneta). Quedas são a maioria das causas de problemas como quebra de rolamentos.

8. Caso a peça de mão caia no chão, verifique em rotação lenta se houver algum dano, em seguida, verifique também a integridade física da broca.

9. **NUNCA** abra o mandril durante o funcionamento do motor (pode causar um curto-circuito no motor).

10. Para evitar acidentes causados pelo funcionamento inesperado do aparelho, verifique se a caixa controladora se encontra desligada (Botão Liga/Desliga) antes de conectar o cabo de energia na tomada.

11. Verifique a integridade dos fusíveis e evite a sobrecarga de trabalho ao motor.

12. Mantenha sempre uma broca engatada na peça de mão mesmo quando o motor não estiver em uso.

13. Espere sempre a rotação da broca parar por completo antes de apoiar a peça de mão na mesa ou descanso de caneta.

14. Verifique se o cabo de energia da caixa controladora está fora da tomada antes de mover o aparelho de lugar. Evite puxões no cabo de energia.

15. Utilize apenas acessórios recomendados pelo fabricante.

16. Verificar as velocidades indicadas pelo fabricantes para cada tipo de broca.

17. Utilize roupa e equipamento de proteção adequada, incluindo uma máscara contra poeira e óculos de proteção. Usar uma unidade de sucção adequada e um ventilador.

18. Mantenha o local de trabalho limpo. Resíduos podem causar acidentes.

19. **NUNCA** aplique óleo ou água nas peças da caixa controladora, peça de mão ou pedal.

20. Após confirmar que a caixa de controle está desligada:

- Conectar o cabo de energia na caixa de controle (Figura A);
- Conectar o pedal na parte traseira da caixa de controle (Figura B);
- Conectar a peça de mão na parte frontal da caixa de controle (Figura C).


21. Ajustar a velocidade de rotação para "0" (zero).


22. Verificar se o mandril da peça de mão está travado, girando a manopla da peça de mão ou puxando a broca para fora.

23. Segurar a peça de mão com uma de suas mãos e ligar a energia da caixa de controle com a outra.

24. Conforme indicando pelas setas, ao ligar a energia da caixa de controle, uma luz verde acenderá e figuras aparecerão no display. Ao desligar, como indicado pela seta, a luz e display devem apagar.



25. Selecionar o modo de controle, seja manual ou pedal através do botão HAND/ FOOT. 

26. Para inverter o sentido da rotação, basta utilizar o botão RIGHT/LEFT. 

27. Utilizar o botão "M" para dar continuidade ou pausar o aparelho. 

28. A luz "HAND" se acende quando o controle manual é ativado, da mesma forma, a luz "FOOT" acende quando o controle através do pedal é ativado.

29. Verificar se a peça de mão funciona corretamente conforme os ajustes de velocidade através da caixa de controle após apertar o botão "M".

30. Verificar se a peça de mão funciona corretamente enquanto ajusta a velocidade através do pedal após apertar o botão "M". A velocidade pode ser alterada dentro do intervalo de velocidade pré-definido através do controle de velocidade da caixa de controle.

6. Problemas comuns e possíveis soluções

PEÇA DE MÃO

Problema	Verificar	Solução
A peça de mão não funciona mesmo com o mandril estando fechado	Se a conexão do cabo da caneta está na parte frontal do motor	Entrar em contato
A peça de mão esquenta durante o uso	Se teve contato com água ou óleo	Entrar em contato
Ruído e vibração durante o uso	Se o mandril ou broca está torto	Trocar o mandril ou broca



CAIXA CONTROLADORA

Condição	Verificar	Solução
Display de velocidade não funciona	O aparelho está bem conectado a tomada?	Verificar se o cabo de energia está bem conectado tanto no aparelho como na tomada.
	Caixa de fusíveis	Substituir caixa de fusíveis.
Botões não funcionam	Interruptor de Energia	Substituir o interruptor de energia.
	Os botões não funcionam após um sinal sonoro?	Entrar em contato conosco.
Peça de mão aquecendo	Está quente?	A peça de mão aquece quando utilizada continuamente. Fazer uma pausa até a temperatura voltar ao normal.
	Está muito quente?	Evitar sobrecarregar continuamente a peça de mão, isto causa superaquecimento e pode danificar a peça.
Peça de mão não funciona	O mandril está aberto?	Fechar o mandril corretamente.
	A peça de mão está bem conectada ao conector?	Conectar a peça de mão ao seu conector, caso ainda mostre “-” continuamente, entrar em contato conosco.

7. Cuidados de segurança




1. Não utilizar o aparelho com cabo de força, plugue e tomada danificados ou defeituosos, isto pode ocasionar incêndios e choques elétricos.
2. Ao desconectar o cabo de força da tomada, segurar o plugue e não tocar com as mãos molhadas.
3. Não dobrar o cabo de energia excessivamente e não pressionar o cabo com objetos pesados.
4. Não colocar perto de equipamentos aquecidos, velas, cigarros ou outros objetos que possam causar fogo.
5. Manter o produto longe do alcance de crianças.
6. Utilizar condutor ou aterramento. Quebra ou vazamento elétrico podem causar choque elétrico.
7. Não conectar muitos equipamentos elétricos na mesma tomada, nem na mesma extensão.

8. Não colocar e nem manejar o produto em locais úmidos e chuvosos.
9. Não derrubar nem danificar a peça de mão. Em caso de mau funcionamento, queda e umidade, não utilizar! Entre em contato conosco.
10. Utilizar o equipamento de forma apropriada conforme as instruções.
11. Não nos responsabilizamos por acidentes causados pelo não cumprimento das instruções.

8. Substituições de fusível

O fusível se encontra na traseira do equipamento, em uma pequena caixa próxima ao encaixe do cabo de energia. Abrir a caixa dos fusíveis, retirar o fusível e, em seguida, substituí-lo. Especificações técnicas do fusível (20V-T3 15A/250V, 230V-T2A/250V)

9. Substituindo o mandril

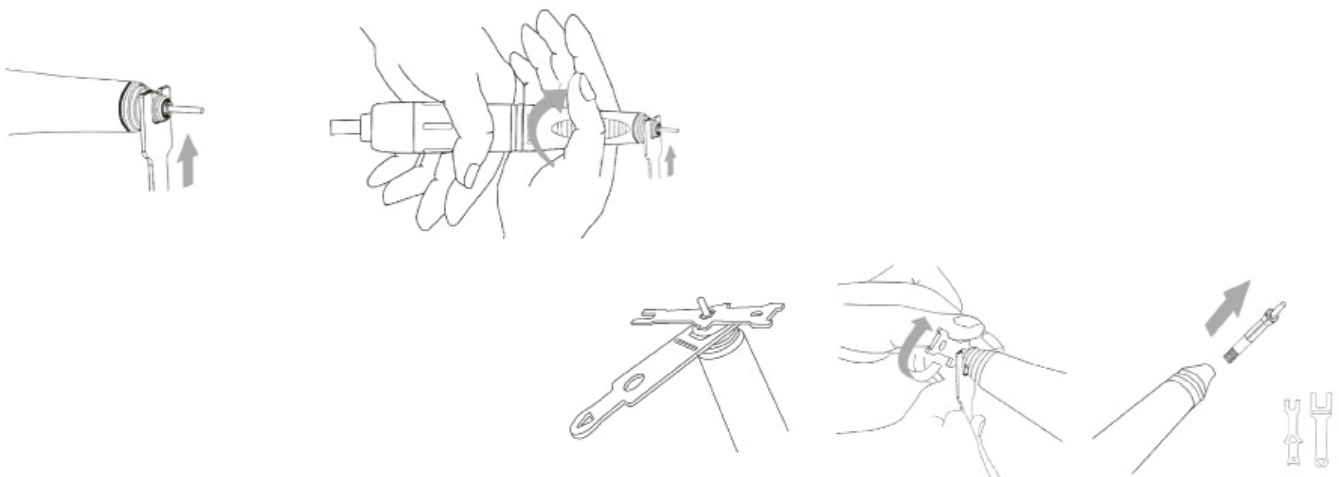

1. Desparafusar a peça de mão.
2. Fixar o mandril com a chave e conectar a chave de fenda na junta delrin.

CUIDADOS

Instalar o novo mandril, manter a ponta limpa.














O reparo e substituições de peças deve ser feito por profissionais. Caso contrário, podem ocorrer problemas e danos aos equipamentos.

Caso tenha desmontado os aparelhos e houver dificuldades na remontagem, entrar em contato conosco. A montagem feita de forma equivocada pode ocasionar danos por vibração, ruído, calor e rolamentos.

Se o mandril não estiver aberto, girá-lo com a chave duas ou três vezes.




10. Substituindo o rolamento dianteiro

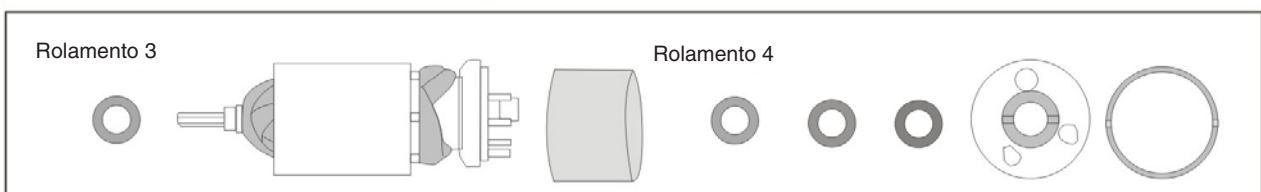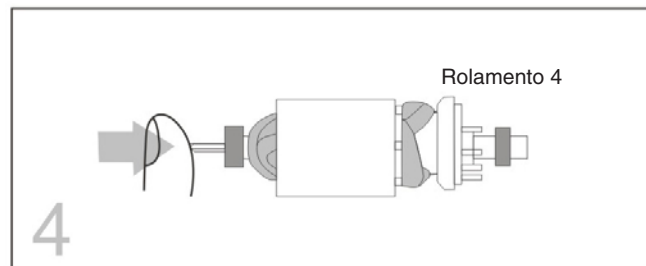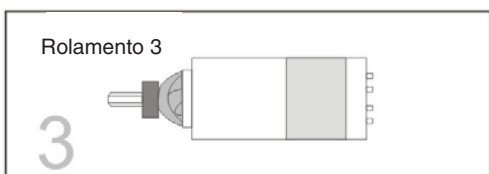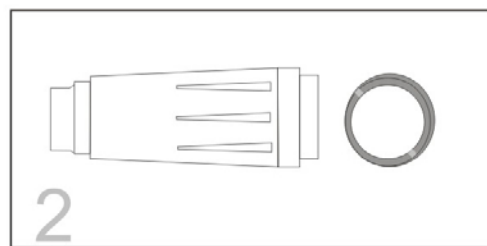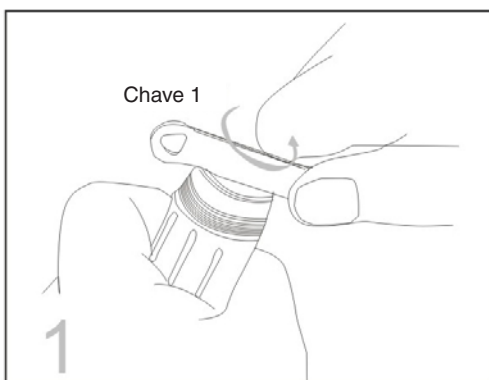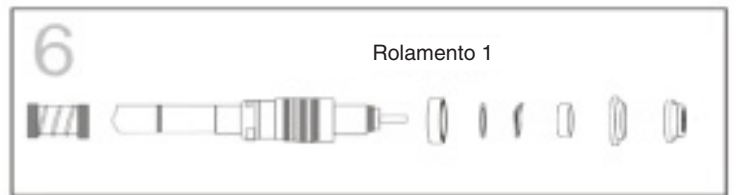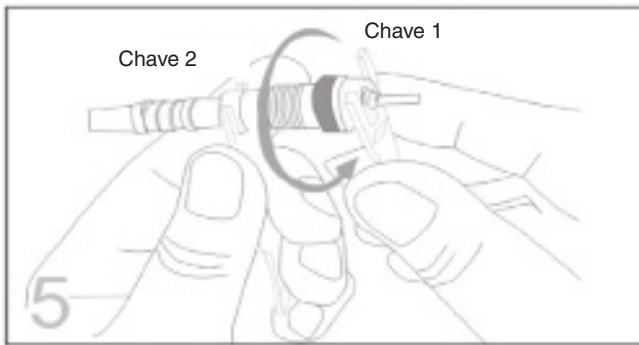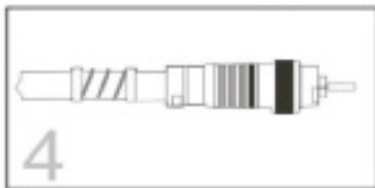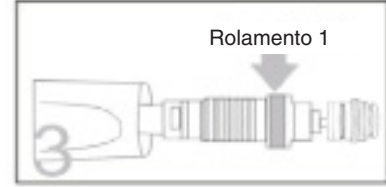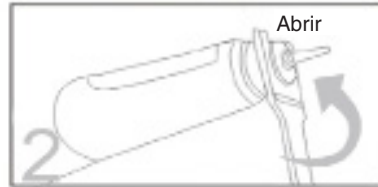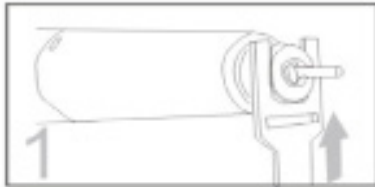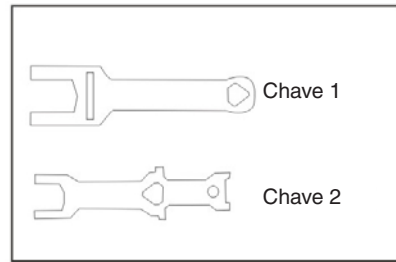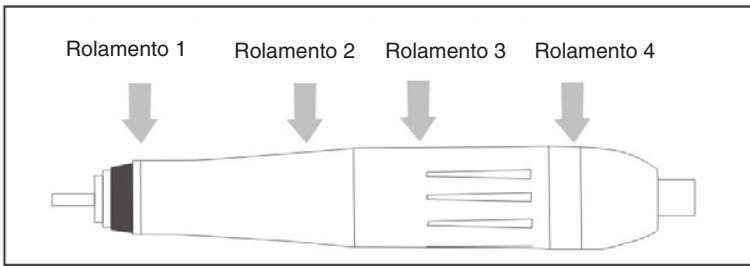




11. Substituindo a parte inferior

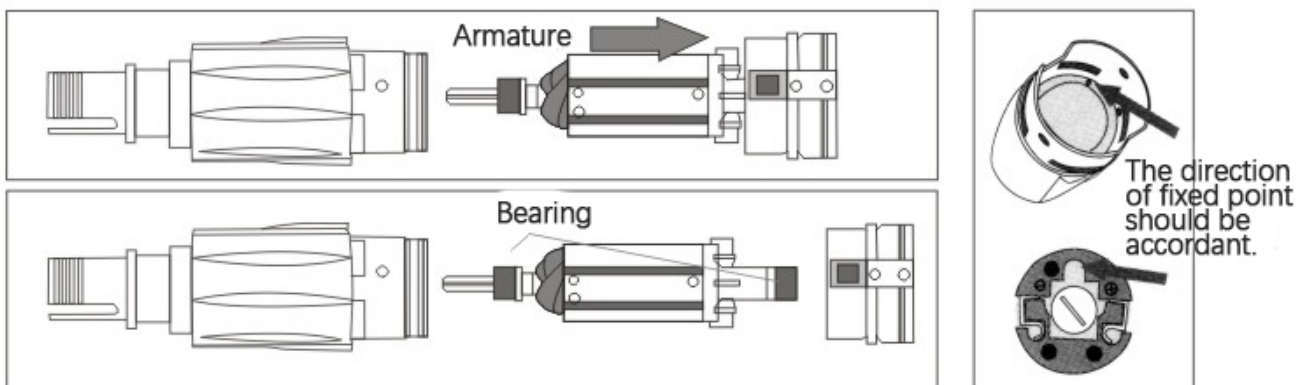


12. Manutenção da peça de mão

1. Manter o local em volta da peça de mão, limpo, livre de pó e resíduo.
2. Remover a poeira apenas com álcool isopropílico. Não utilizar óleo ou água para realizar a limpeza. A graxa dentro do rolamento pode derreter devido ao contato com esses líquidos.
3. A limpeza com ar comprimido é aceitável, porém, deve-se atentar a pressão utilizada, pois, isto pode afetar gravemente a peça de mão ou motor.
4. Para inserir uma broca na peça de mão, girar a manivela na direção de abertura para abrir o mandril. Com o mandril aberto, é possível trocar ou colocar uma nova broca. Girar a mesma manivela para a direção de fechamento, fechando o mandril, assim a broca é travada. ***Gire o anel até ouvir um "click".***

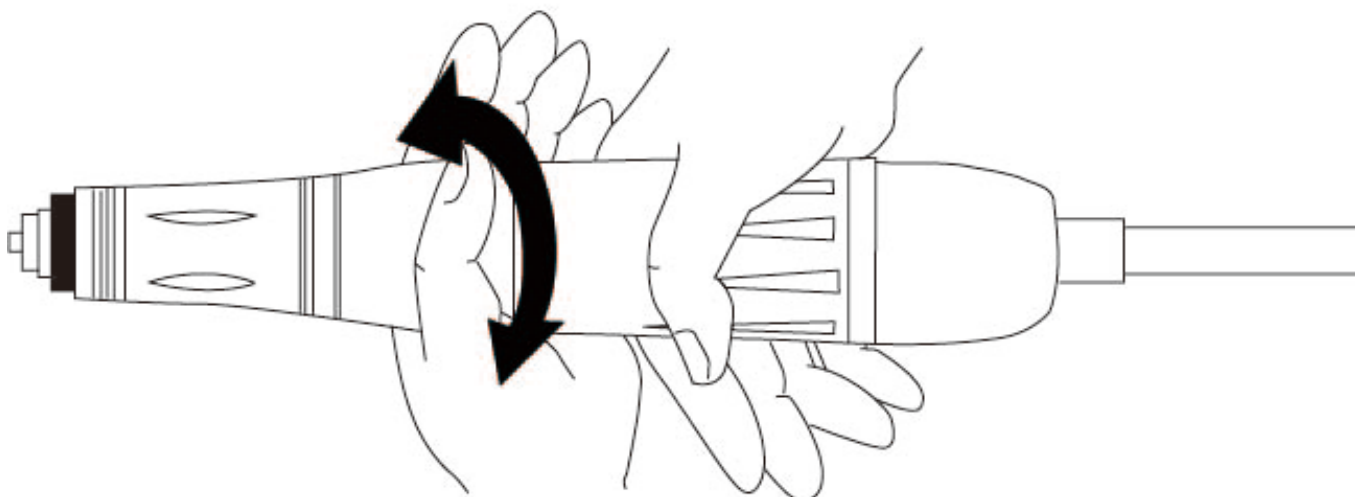




13. Nome das peças

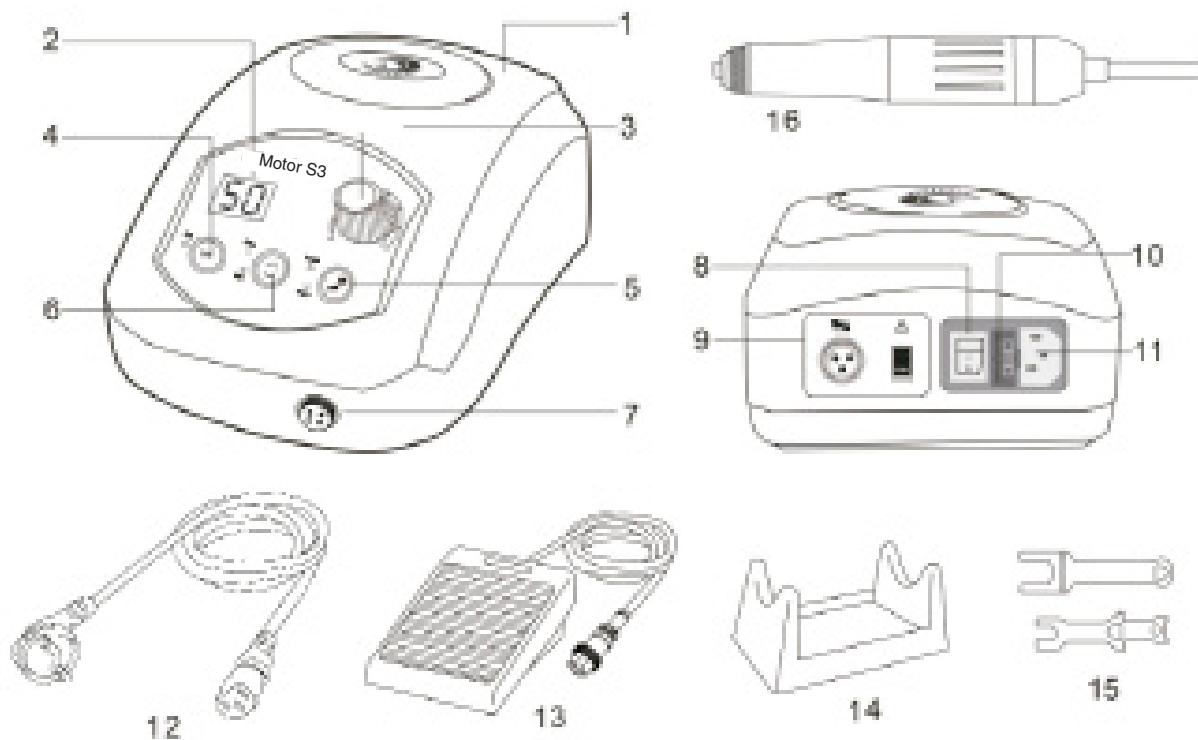

1. Caixa de controle
2. Display de Velocidade (RPM)
3. Controle de Velocidade da Rotação
4. Botão de ON/OFF (Liga/Desliga)
5. Botão Modo de Controle (Manual/Pedal)
6. Botão de Sentido da Rotação (Normal/Reverso)
7. Conector da Peça de Mão
8. Interruptor de Energia
9. Conector do Pedal
10. Caixa de Fusíveis
11. Conector do Cabo de Energia
12. Cabo de Energia
13. Pedal
14. Suporte para Peça de Mão
15. Chave
16. Peça de Mão

S3 - PEÇA DE MÃO

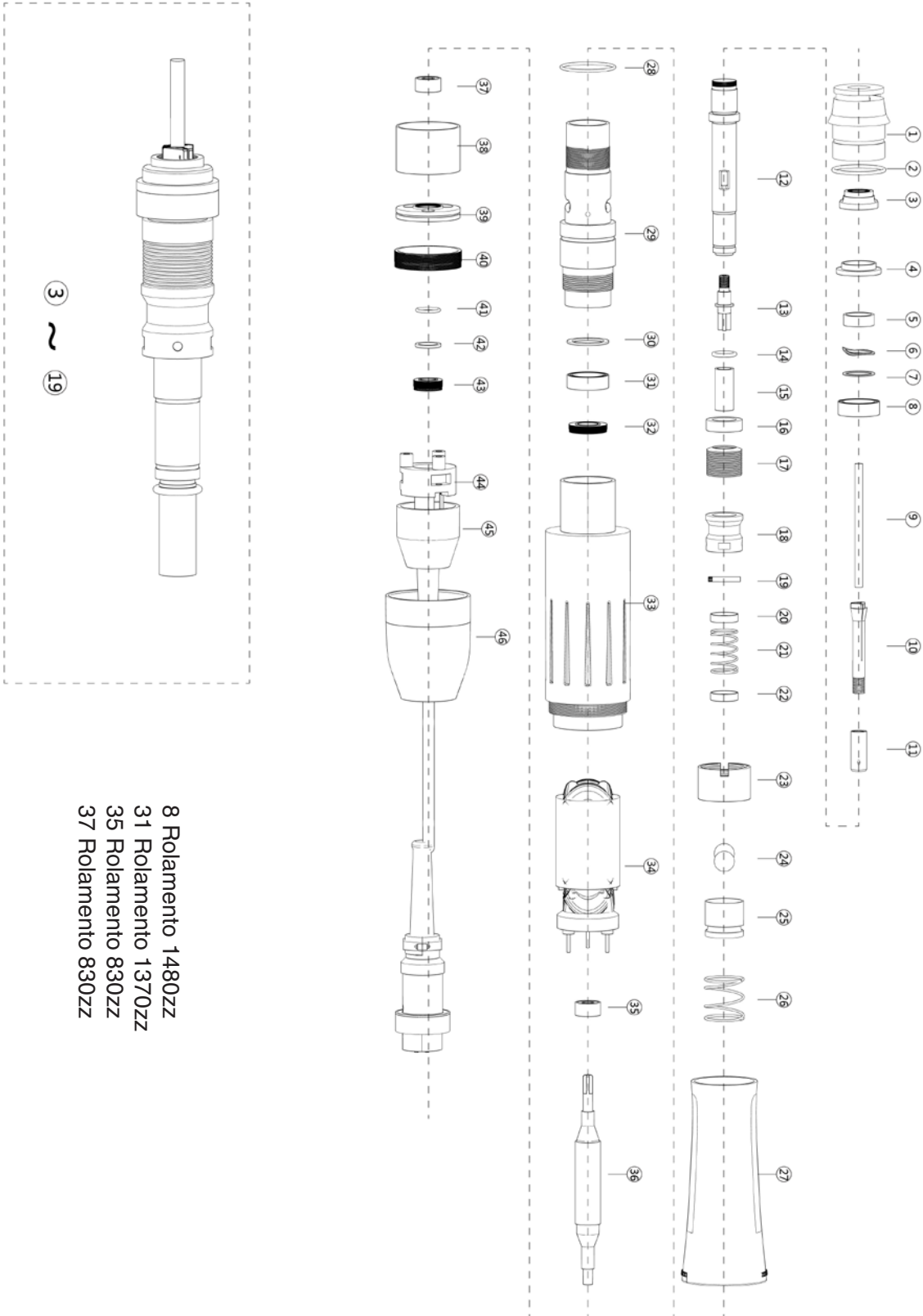

- 8 Rolamento 1480ZZ
- 31 Rolamento 1370ZZ
- 35 Rolamento 830ZZ
- 37 Rolamento 830ZZ

CONTATOS



assistencia@odontomega.com.br

Rua Rui Barbosa, 640 - Centro / Ribeirão Preto - SP



(16) 98103-5836



(16) 3610-9636



ODONTOMEGA